



# REEMPLAZO TESTICULAR

Guía para el paciente

## En esta guía

Descripción general de los testículos	4
Trastornos testiculares comunes	5
Opciones de tratamiento	6
Prótesis testicular rellena de solución salina Torosa®	8
Información sobre el seguro	10

Perder o haber perdido uno o ambos testículos no es un tema fácil sobre el que se puede hablar, ***pero puede ser una realidad para muchos.***

Independientemente de su edad, esta pérdida puede tener un impacto sobre su autoestima, sus relaciones e incluso en el estilo de vida que desea llevar. El hecho es que existe una opción de tratamiento que puede ayudar a aliviar el malestar de esta afección.



Restaurar un aspecto más natural.

***Existe una solución.***

Lea esta guía para obtener más información y luego hable con su médico sobre las posibles opciones de tratamiento.

## Descripción general de los testículos

Los testículos son dos órganos de forma ovalada en el sistema reproductor masculino responsables de producir espermatozoides y hormonas masculinas como la testosterona.

Los testículos están dentro de un saco de piel llamado escroto que cuelga fuera del cuerpo detrás del pene.

Los trastornos o traumatismos en los testículos pueden provocar complicaciones graves, como desequilibrios hormonales, disfunción sexual e infertilidad. Además, la pérdida de testículos puede tener un efecto psicológico negativo y puede afectar su autoestima o confianza en sí mismo.



**Algunos de los trastornos más comunes que afectan a los testículos incluyen los siguientes:**

- Traumatismo o lesión física en los testículos
- Torsión testicular
- Rotura testicular
- Cáncer testicular
- Falta de descenso de un testículo (criptorquidia)


**Se ha demostrado que la ausencia de un testículo es una experiencia traumática desde el punto de psicológico para hombres de todas las edades.<sup>1</sup>**



## Opciones de tratamiento

Ya sea que le hayan extirpado quirúrgicamente uno o ambos testículos, se someterá próximamente a una cirugía de este tipo o no tiene testículos debido a un defecto congénito, enfermedad o traumatismo, hay opciones que debe evaluar.

Antes de tomar una decisión, debe hablar con su médico sobre sus expectativas a largo plazo, inquietudes y riesgo potencial o complicaciones para cada una de las opciones disponibles.

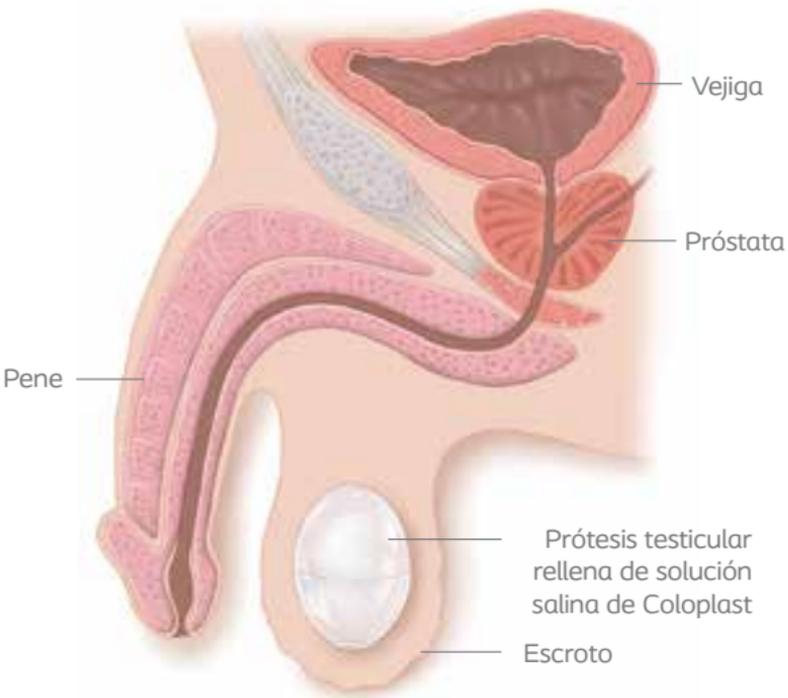

Se ha demostrado que las prótesis testiculares reducen el impacto psicológico resultante de la pérdida o ausencia de un testículo.<sup>1</sup>

## Opciones no quirúrgicas:

Sin tratamiento: Deja un escroto vacío en parte o en su totalidad.

## Opciones quirúrgicas:

**Orquiectomía subcapsular:** Quita gran cantidad del tejido de la cápsula testicular, lo que deja una estructura escrotal más pequeña.

**Implante testicular:** Prótesis blanda rellena de solución salina que se utiliza con fines cosméticos. Un implante puede colocarse en el momento de la cirugía de orquiectomía (extirpación quirúrgica de un testículo o ambos) o en una fecha posterior.

Las prótesis testiculares representan una solución quirúrgica sencilla, eficaz y segura que alivia esos sentimientos de alteración de imagen corporal para muchos pacientes.<sup>2</sup>



# Prótesis testicular Torosa<sup>®</sup>

Evalúe la posibilidad de implantación de la prótesis testicular rellena de solución salina Torosa<sup>®</sup>, la única prótesis testicular aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) en el mercado.

Torosa permite crear y restaurar un aspecto visual más natural de los testículos en el escroto.



**El 88%** de los hombres que se han realizado un implante de prótesis testicular, informó que volverían a someterse a la cirugía si fuera necesario y **el 94%** se lo recomendaría a un amigo.<sup>3</sup>

## **La elección de un implante testicular es personal.**

Es importante saber que es estrictamente para fines cosméticos y que no es un testículo funcional.

La falta de un testículo puede ser un reto emocional. Torosa puede aliviar esta carga ya que restaura su aspecto físico.

Los beneficios cosméticos que aportan las prótesis testiculares Torosa han tenido como resultado beneficios psicológicos y altos niveles de satisfacción del paciente.

Una vez que realice el implante será importante limitar sus actividades por un corto período para permitir el tiempo necesario para una curación adecuada. Su médico elaborará un plan específico para el proceso de recuperación, actividades y cuándo puede reanudar las actividades sexuales.



## Cobertura del seguro

Los especialistas en facturación del consultorio de su médico pueden ayudar a confirmar su cobertura. A continuación, se muestran algunos grupos de pago y codificación comunes para la urología protésica masculina:

Código CPT	Descripción del procedimiento
54520	Orquiectomía, simple (incluida la subcapsular), con o sin prótesis testicular, abordaje escrotal o inguinal
54522	Orquiectomía parcial
54530	Orquiectomía radical, en el caso de tumor; abordaje inguinal
54660	Inserción de prótesis testicular (procedimiento separado)
54690	Laparoscopia quirúrgica; orquiectomía
55175	Escrotoplastia; simple
55180	Escrotoplastia; complicada

### Información sobre pedidos

Soporte quirúrgico de urología intervencionista que ofrece Coloplast **800-258-3476**

# Notas

Notas/Preguntas para su médico:

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**Referencias:**

1. Bodiwala D, Summerton DJ, Terry TR. Testicular prostheses: development and modern usage. *Ann R Coll Surg Engl.* Mayo de 2007; 89(4):349-53.
2. Hayon S, Michael J, Coward RM. The modern testicular prosthesis: patient selection and counseling, surgical technique, and outcomes. *Asian J Androl.* Enero-febrero de 2020; 22(1):64-69.
3. Clifford TG, Burg ML, Hu B, Loh-Doyle J, Hugen CM, Cai J, Djaladat H, Wayne K, Daneshmand S. Satisfaction With Testicular Prosthesis After Radical Orchiectomy. *Urology.* Abril de 2018; 114:128-132.

**INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE SEGURIDAD:**

Un implante testicular se oculta completamente dentro del cuerpo para solucionar la pérdida de un testículo o ambos tanto para adultos como para niños. La prótesis testicular rellena de solución salina TOROSA de Coloplast está diseñada para usarse cuando está indicado el reemplazo testicular con fines cosméticos, es decir, en el caso de agenesia o después de la extirpación quirúrgica de un testículo.

La implantación de prótesis testiculares está contraindicada en presencia de infección o tumores sin tratamiento (crecimiento anormal).

Los implantes testiculares son soluciones quirúrgicas que requieren un período de curación que tienen riesgos asociados con la cirugía, como dolor, reacciones a la anestesia o a la silicona, sangrado, infección, repetición de la cirugía debido a cambios de tamaño o posibles pérdidas. Las consideraciones sobre el implante pueden incluir su afección médica (por ejemplo, lupus, esclerodermia, trastornos neuromusculares), estilo de vida, preferencia personal y costo.

Este tratamiento debe estar indicado por su médico. Si bien muchos pacientes se benefician gracias al uso de este dispositivo, los resultados pueden variar. Analice las opciones de tratamiento con su médico para comprender los riesgos y los beneficios a fin de determinar si el implante testicular es adecuado para usted.

Si tiene más preguntas, llame a Coloplast Corp al 1-800-258-3476 o consulte el sitio web de la compañía en [www.coloplast.us](http://www.coloplast.us).

Hable con su médico. Pregunte sobre las opciones de tratamiento para el reemplazo testicular y cómo Coloplast puede simplificarle la vida.

Para obtener más información, visite [www.ColoplastMensHealth.com](http://www.ColoplastMensHealth.com)



1. Apunte su teléfono inteligente al código QR.
2. Establezca su cámara para centrar el código QR.
3. Su teléfono inteligente iniciará de manera automática la actividad de lectura del código QR.
4. Toque la barra de notificaciones para abrir el sitio web.

Coloplast desarrolla productos y servicios que facilitan la vida de las personas que presentan afecciones médicas personales y privadas. Al trabajar en estrecha colaboración con las personas que usan nuestros productos, creamos soluciones que son sensibles a sus necesidades especiales. Nos referimos a esto como “cuidado de la salud íntima”.

Nuestra empresa abarca el cuidado de la ostomía, urología intervencionista y continencia, además del cuidado de la piel y las heridas. Operamos en todo el mundo y contamos con más de 12,000 empleados.



Cuidado de la ostomía  
Cuidado para la continencia  
Cuidado de la piel y las heridas  
Urología intervencionista

Coloplast Corp. Minneapolis, MN 55411  
Soporte quirúrgico de urología intervencionista 1-800-258-3476  
[www.coloplast.us](http://www.coloplast.us) El logotipo de Coloplast es una marca comercial registrada de Coloplast A/S.  
© 2021 Coloplast Corp. Todos los derechos reservados.  
PM-17339 07.21